



Istruzione per l'uso:

Quantum Bite

Il bite che ti è stato consegnato è realizzato in polimero antibatterico ed è stato modellato individualmente sulla tua arcata dentale.

Il bite va portato per 6-8 ore durante la notte.

Posizionamento

Si consiglia di posizionare il bite prima di coricarsi, preferibilmente davanti allo specchio per assicurarsi di adattarlo perfettamente ai denti esercitando una leggera pressione con le dita.

Evitare di appoggiare il bite sull'arcata serrando poi i denti per completarne il posizionamento. Si tratta di un'operazione che può deformare il bite e renderlo inutilizzabile.

Rimozione

Rimuovere il bite facendo delicatamente leva con le dita sui bordi.

Pulizia e conservazione

Sciquare il bite sotto un getto di acqua corrente per rimuovere i depositi di saliva e asciugarlo.

Riporre il bite nel contenitore fornito alla consegna e conservarlo in un luogo aerato e asciutto.